

ご使用のしおり

メディロンベキシン18、メディロンベキシン21



■メディロンベキシン18、メディロンベキシン21の特徴

- ・メディロンベキシンは、ドイツの医療用弾性ストッキングメーカー、メディ社(medi GmbH & Co.KG)が開発した院内・術後ケア用の弾性ストッキングです。
- ・足首部の圧迫圧は、トロンベキシン18が18mmHg、トロンベキシン21が21mmHgです。
- ・メディロンベキシンは、もっとも高い圧迫圧がかかる足首から近位にかけて、段階的に圧迫圧が低くなる構造です。
- ・製品サイズを簡単に確認できるよう、各サイズでかかと部のカラーを変えています。また、製品かかと部の内側にペロア加工を施し、かかとを優しく保護します。
- ・モニターホールまたはつま先から、足の状態を観察できます。

■ご使用に関して

- ・必ず医師にご相談の上、着用してください。
- ・多汗性、脂性のお肌の方は、着用時に天花粉の使用をおすすめします。
- ・トップバンド部の滑り止めシリコンがお肌にあわないときは使用を中止し、医師にご相談ください。
- ・ストッキングにほつれ、糸切れ等が発生しても、その部分は切り取らないでください。伝線、穴あき等の原因になります。ご不明な点はお問い合わせください。

★着用していて、しびれ、痛み、むくみ、腫れなどがある場合、また指先が青白くなったり、紫色に変色した場合、脚が発熱あるいは発赤した場合は、直ちに使用を中止し医師にご相談ください。




■洗濯方法

- ・手での押し洗いをおすすめします。もみ洗いは避けてください。液温は95℃を限度とし、洗濯機による洗濯が可能です。(洗濯ネットをご使用下さい)
- ・よくすすいだ後、手で軽くしぼり、形を整えて陰干しにしてください。
- ・低い温度でのタンブル乾燥が可能です。直射日光は生地を傷めることがありますので、ご注意ください。
- ・柔軟仕上げ剤や漂白剤、ベンジン等の使用、ドライクリーニング、アイロンがけはしないでください。
- ・他の洗濯物の脱色から色移りすることがありますので、単体でお洗濯してください。

★軟膏、クリーム類を使用しているときは、一日一回、必ず洗ってください。

■メディロンベキシン18、メディロンベキシン21の装着方法

1. ストッキングの上部をあらかじめ足首部分まで裏返し、ストッキングのかかとの向きに注意し、つま先からかかとまで履きます。(図①)
2. ストッキングのかかとの位置を正確にあわせ、足の甲の部分にシワやたるみがないことを確認してください。(図②)
3. 裏返した部分を少しずつ引き上げます。この時、ストッキングがシワになったり、よじれたりしないよう、またストッキングに爪や指輪などが引っ掛からないようご注意ください。(図③)
4. ストッキングにシワ、たるみ、よじれができた場合、ゆっくりと均等に伸ばしてください。
5. 装着のコツをつかむとスムーズに履けるようになります。コツは引き上げの力加減です。上へいくほど力を弱めて着用してください。

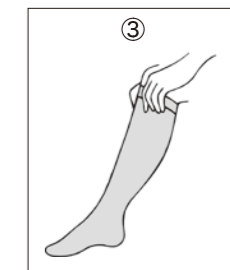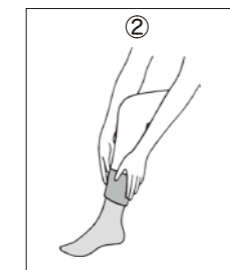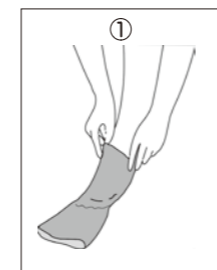

■補助器具を使用した場合の装着方法 *写真はホスピタルバトラーを使用(品番:900-3)

1. 筒状の補助器具の内側に配置したストッキングを補助器具に掛けて、かかと部が最上部に見えるまで、裏返しに引き下げていきます。(①、②)
2. 補助器具にかぶせたストッキングがずれないように手で固定しながら、つま先からストッキングに通していきます。かかとまで正しくフィットさせたら、次はストッキングを固定させずに補助器具をゆっくり近位に移動させます。(③)
3. 下肢の周径が大きく、補助器具による引き上げが困難な部位がある場合は、補助器具からストッキングをはずし、そこからは手で引き上げてください。(④)
ストッキングにシワ、たるみ、よじれができた場合、ゆっくりと均等に伸ばしてください。



■着用中における足の状態の観察・確認

メディロンベキシン18



足底部のモニターホールで足の状態を観察できます。

モニターホールからつま先を出した状態で着用しないでください。

メディロンベキシン21



つま先から足の状態を観察できます。

ナック商会株式会社 URL : www.nakcorp.co.jp
e-mail : order@nakcorp.co.jp
■大阪本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀5-7-13
tel : 06-6599-9000 fax : 06-6599-9007
■東京オフィス 〒165-0026 東京都中野区新井5-22-8
tel : 03-5343-7955 fax : 03-5343-7956
お客様相談・注文窓口 : 0120-06-0390