

■アームスリーブ 装着の手順

①



光沢生地が内側になるようアームスリーブを腕に通し、脇の下まで引き上げます。アームスリーブ中央の生地の切れ込み部分を肘関節に合わせます。


②



腕の付け根に最も近いバンドを留め、手首の方から上腕へ向かってバンドを交互に留めます。この時、バンドが斜めにならないように留めます。また、折り目・しわ・隙間ができないようにご注意ください。

※ハンドラップ(別売)の使用方法については、裏面をご参照ください。

③

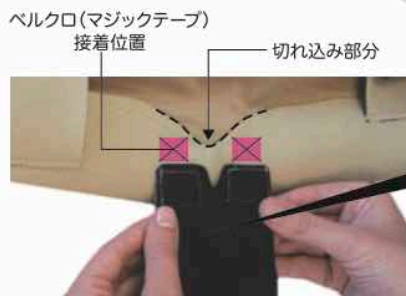

付属の肘バンドを肘関節内側に装着します。この時、アームスリーブ本体との間に隙間ができないように留めてください。ベルクロ(マジックテープ)は、写真のように、肘部の切れ込み部分から1cm以上離れた所に留めてください。ベルクロが光沢生地に引っ掛かると、生地を傷める原因となりますのでご注意ください。

※家事やパソコン作業などで肘を屈曲する場合には、肘バンドを外すことで過度の締め付けや食い込みを予防できます。



④



付属のBPSカードの目盛を各バンドの2本の基準線に合わせ、圧迫力を調整します。

圧迫数値のメモリ内におさまるよう留め直してください。圧迫力は、20-30mmHg、30-40mmHgに調節が可能です。※圧迫力の調整は、医師の指導のもと行ってください。

<例 20-30mmHg の場合>



20-30mmHgに正しく調整できています。



もう少し強く締めます。  
(20mmHg以下の圧力がかかっています)



強く締めすぎています。  
(40mmHg以上の圧力がかかっています)

## ■カバーアップ 必要に応じてアームスリーブの上から装着します。



滑かな素材でできており、ベルクロにより身体他の部分を傷つけたり、衣服に引っ掛かったりすることを防ぎます。

## ■内容物

- 1. アームスリーブ 1枚
- 2. カバーアップ 1枚
- 3. B P S カード 1枚

## ■ハンドラップ (別売) 装着の手順

①



ハンドラップの黒い面を内側にし、丸く空いた穴に親指を通します。  
この時、2本のベルトの長い方が手首側にくるように装着します。

②



A: 写真のとおりハンドラップが動かないよう掌の生地を握ります。  
B: 2本のバンドの分岐の所にあるベルクロ (マジックテープ) をもう片方の手でつまみ、適度に引っ張りながら掌の生地に留めます。

③



短い方のバンドを親指と人差し指の間へ巻きつけ、手背にしっかりと適度な圧がかかるように調節して留めます。このとき、短い方のバンドの上端が、指の付け根に沿うように留めてください。

④



長い方のバンドは浮腫の状態に合わせて巻き方を変えて使用することが可能です。手背の浮腫が気になる場合は手背へ、手首の浮腫が気になる場合は手首へ巻きつけます。このとき、適度な圧がかかるように調整してください。

⑤



ジャクスタフィット アームスリーブを併用する際は、ハンドラップの手首側のバンドをアームスリーブの上に巻いてください。

### 装着の際の注意

- \* 必要な圧力は、必ず医師にご相談ください。
- ・ベルクロを中に押し込まないでください。
- ・ベルクロが直接肌に触れないように装着してください。皮膚を傷つける原因となり得ます。

### ご使用について

- ・ご使用の際は、必ず医師にご相談ください。
- ・ご使用のしおりのほかに、製品に付属する添付文書をよくお読みください。
- ・製品の仕様、外観は改良などの理由により予告なしに変更することがあります。
- ・印刷物と実際の製品の色は異なる場合があります。
- ・返品・交換については、商品が未使用の場合には承ります。ただし、商品が未使用であっても、弊社の商品発送日から起算して30日を超えた場合の返品・交換は、いたしかねます。ご了承ください。

### お手入れ方法

- ・水温40℃以下で市販の洗剤を溶かし、洗濯機または手で押し洗いしてください。
- ・洗濯機で洗う場合は、洗濯ネットをご使用ください。
- ・柔軟剤や漂白剤、ベンジン等の使用、ドライクリーニング、アイロンがけはしないでください。
- ・洗濯時に多少脱色・色移りする場合がありますので、他の洗濯物との混入は避けてください。
- ・バンド部分のベルクロ (マジックテープ) は必ず留めた状態で洗濯してください。
- ・カバーアップはいたみやすい生地のため、単体で手洗いしてください。

本しおりの内容は平成27年9月現在の内容です。

### アームスリーブ、ハンドラップの脱ぎ方

- ・アームスリーブは一番上のバンドから順に外してください。
- ・外したベルクロは折り返して本体に留めてください。

※平成20年3月21日保医発第0321001号等により、一定の要件を満たすことを前提に、弾性着衣の購入は療養費支給の対象となりました。詳細は関係省庁や弊社までお問い合わせください。

### 製造販売元：ナック商会株式会社

第1種医療機器  
製造販売業許可番号 : 27B1X00123  
URL : [www.nakcorp.co.jp](http://www.nakcorp.co.jp)  
e-mail : [order@nakcorp.co.jp](mailto:order@nakcorp.co.jp)

■大阪本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀5-7-1 3  
(製造販売) tel : 06-6599-9000 fax : 06-6599-9007

■東京オフィス 〒165-0026 東京都中野区新井5-2-2-8  
tel : 03-5343-7955 fax : 03-5343-7956

お客様相談・注文窓口 : 0120-06-0390