

ジャクスタライトの装着方法

医療機器届出番号：27B1X00123CAMP02

CIRCAID
by medi

1. まずは付属のレッグライナーとコンプレッションアンクレットを装着します。



2. 次にレギンスを装着します。



①

上2つのバンドを広げ、膝のすぐ下からふくらはぎの周りに緩く留めて、レギンスを固定していきます。



②

次に下2つのバンドを、脚の正面で交差させながらしっかり引き締めて、1番下のバンドを留めます。



③

下から2番目のバンドを留める前に、下から3番目のバンドを一旦はずします。下から2番目と3番目のバンドをピンと張った状態に保ちながら、下から2番目のバンドをしっかり引き締めて、レギンスの外側に留めていきます。


各バンドがしわのない状態になるよう角度を調整していきます。



裏面に続く

④

下から3番目のバンドを留める前に下から4番目のバンドを外します。
この最後2つのバンドの角度を調整しながら下から3番目のバンドを
しっかり引き締めて、レギンスに留めます。
最後に1番上のバンドをしっかり引き締めて、レギンスに留めます。

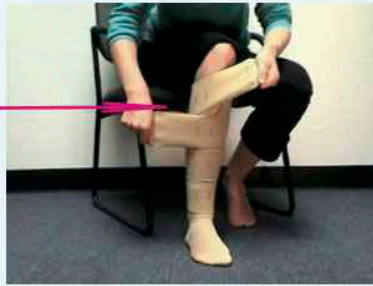

3. 次にBPSカードで圧迫力の調整を行います。



BPSカード

①

同梱のBPSカードを取り出します。
カードを使用し圧迫力を調整します。

②

1番下のバンドから開始します。
レギンス上の圧迫力基準線とカード上の線を合わせます。

③

レギンス上の2本目の圧迫力基準線が、カード上の色分けされたスケール通りの位置にあるかを確認します。

④

レギンス上の2本目の圧迫力基準線が正しい位置まで届いていない場合（図A）や超えている場合は、必要に応じてバンドを再調節し、2本目の圧迫力基準線が正しい位置に合わせるようにします。
どのバンドの圧迫力基準線も、カード上のスケール位置が同じになるように調整してください。

(図A)



< 3種類の圧迫力 >

- 20-30 mmHg
- 30-40 mmHg
- 40-50 mmHg

右の写真のようにBPSカードを
参考に圧迫力を調整します。



(図B)



< 30-40 mmHgの場合 >



*適切な位置で留めます。

*使用の際には医療従事者にご相談の上、添付文書をよくお読みください。

製造販売元 : ナック商会株式会社

第1種医療機器 : 27B1X00123
製造販売業許可番号
URL : www.nakcorp.co.jp
e-mail : order@nakcorp.co.jp

■大阪本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀5-7-1 3
(製造販売) tel : 06-6599-9000 fax : 06-6599-9007

■東京オフィス 〒165-0026 東京都中野区新井5-2-2-8
tel : 03-5343-7955 fax : 03-5343-7956
お客様相談・注文窓口 : 0120-06-0390